

KARTA PRODUKTOWA

Basen sanitarny jednorazowego użytku z przykrywką 2 l; WardPak™	
Marka	: CURAS®
Kategoria	: Pielęgniarstwo/opieka
Zakres	: Hygiene Pulp™
Grupa produktowa:	: Usuwanie nieczystości pochodzenia ludzkiego
NR REF.	: 08000

**OPIS PRODUKTU**

Basen sanitarny jednorazowego użytku z pulpy higienicznej o właściwościach wodoodpornych. Pojemność - 2 l. Do utylizacji w maceratorze. Wyposażony w przykrywkę do zastosowania w sytuacjach awaryjnych.

PRZEZNACZENIE

Basen sanitarny jednorazowego użytku do oddawania moczu i kału przez unieruchomionych pacjentów. Odpowiedni do stosowania nałóżkowego lub na przenośnej toalecie. Może być stosowany poprzez umieszczenie jednego basenu na drugim lub w połączeniu z podpórką z tworzywa sztucznego. Produkt jednorazowego użytku.

CECHY I ZALETY

- Produkt ekologiczny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej.
- Produkt jednorazowy w celu ograniczenia ryzyka zakażenia krzyżowego oraz zakażeń szpitalnych.
- Co najmniej 4 godziny wodoodporności (dotyczy tylko basenu).
- Skala wskazująca przybliżoną objętość.
- Jeśli jest to konieczne, 2 baseny lub więcej można umieścić jeden na drugim dla dodatkowej stabilności i lepszej higieny.
- Idealnie pasuje do standardowej podpórki z tworzywa sztucznego (NR REF. REF 08110), która zapewnia dodatkową stabilność.
- Zaprojektowany w sposób umożliwiający zastosowanie na standardowych przenośnych toaletach.
- Unikalna karbowana struktura gwarantuje dodatkową wytrzymałość basenu w przypadku jego napełnienia.
- Wzmocnione krawędzie ułatwiają trzymanie i przenoszenie basenu po jego napełnieniu.
- Zaokrąglone brzegi dna zapobiegają pęknięciom i zwiększają odporność na wilgoć.
- Zaprojektowany w sposób umożliwiający ułożenie w stos dla łatwości składowania i ograniczenia zajmowanego miejsca.
- Wyposażony w jednorazową przykrywkę zapobiegającą nieprzyjemnym zapachom i przypadkowym rozlaniom zawartości.
- Opakowanie wewnętrzne (WardPak™) ułatwia użytkowanie i chroni produkt przed kurzem i zanieczyszczeniem.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

NR REF.	Pojemność	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Średnia waga/szt.	Opakowanie
08000	2 l (~68 oz)	36 x 29 x 10 cm	60 g ± 3 g	WardPak™

Skład

- Basen sanitarny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej w połączeniu z mieszkanką wodną odporną na płyny.
- Przykrywka wykonana z tektury.

Kraj pochodzenia

- Chiny

Sterylizacja

- Niesterylny
- Możliwość sterylizacji z użyciem tlenku etylenu (ETO) lub promieni gamma.

Okres przydatności do użycia

- Basen z przykrywką: 5 lat

Wybrane normy i wytyczne

- Dyrektywa MDD 93/42/EWG (Oznakowanie CE, Klasa I), zmieniona Dyrektywą 2007/47/WE.
- ISO 9001:2008
- PAS29:1999 Próba odporności na płyny przez okres co najmniej 4 godzin (temperatura wody 35°C±3°C).
- PAS29:1999 Próba maceracji przy użyciu maceratora stosowanego w pokoju-słuzie, cykl normalny.

Zalecane warunki przechowywania

- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz zapłonu.

Proponowana metoda utylizacji

- W przypadku standardowych odpadów, zużyty produkt należy utylizować w maceratorze lub zgodnie z lokalnym protokołem dot. odpadów. W przypadku braku maceratora, należy spalić lub wywieźć na składowisko odpadów.
- W przypadku zanieczyszczonej lub zakażonej zawartości, produkt należy traktować jak odpad medyczny oraz utylizować zgodnie z protokołem dot. odpadów medycznych.

Symbole produktu



INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA

NR REF.	Kod kreskowy EAN-13	Opakowanie wewnętrzne	Karton	Masa brutto
08000	5051400080005	50 szt. / WardPak™	150 szt. / karton (3 opakowania) + 10 przykrywek	~10 kg

Komponenty/Właściwości materiałów			Zalecenia dot. utylizacji odpadów				
Opakowanie	Materiał	Zawiera PCW	Spalenie	Wysypisko	Macerator	Recykling	Ponowne użycie
WardPak™	PE	--	✓	(✓)		✓	

Wyłącznie dystrybutor w Polsce:

Karton zewnętrzny	Tektura falista	--	(✓)	(✓)		✓	
Paleta transportowa	Drewno	--				(✓)	✓

✓ = Wysoce zalecane

(✓) = Zalecane

INFORMACJE DODATKOWE

- Produkty Curas[®] Hygiene PulpTM zostały poddane kontroli w kilku modelach maceratorów i spełniają wymagania rekomendowanych procedur operacyjnych.
- Kod HS: 4823709000
- Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: info@curas.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

POLMIL

POLMIL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b

85-758 Bydgoszcz

tel. +48 52 348 67 66, fax. +48 52 348 68 34

handlowy@polmil.pl www.polmil.pl