

Detro[®] Enzym Foam

Wieloenzymatyczna pianka do zwilżania oraz wstępnego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz pozostałych wyrobów medycznych


- gotowa do użycia pianka
- na bazie 4 różnych enzymów
- szeroka kompatybilność materiałowa
- zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń organicznych na powierzchniach narzędzi
- skutecznie usuwa biofilm



WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

GOTOWY DO UŻYCIA

OPAKOWANIE:

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	KOD KRESKOWY
	9 x BUTELKA 1 spryskiwacz dwufunkcyjny do butelki 1L	8680097101457



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

Detro® Enzym Foam

Wieloenzymatyczna pianka do zwilżania oraz wstępnego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz pozostałych wyrobów medycznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Pianka Detro® Enzym Foam jest przeznaczona do wstępnego mycia narzędzi chirurgicznych oraz zanieczyszczonych organicznie wyrobów medycznych. Skutecznie zapobiega formowaniu się biofilmu oraz zabezpiecza powierzchnię narzędzi przed zasychaniem substancji organicznych. Dzięki bezpiecznej kompozycji narzędzia mogą pozostawać zwilżone do 72 godzin. Doskonała rozpuszczalność w wodzie powoduje, że pianka bardzo łatwo wypłukuje się z narzędzi. Preparat posiada szeroką kompatybilność materiałową z wyrobami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, polistyrenem, PVC, polikarbonem, ABS, silikonem, gumą, szkłem, porcelaną.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia w formie pianki do rozpylania
- Bez zawartości aldehydu, fenolu i chloru
- Dzięki pianie wytwarzanej przez ergonomiczny rozpylacz, preparat równomiernie pokrywa powierzchnię narzędzi
- Trwała piana, która nie dopuszcza do kontaktu powietrza z powierzchnią sprawia, że narzędzia pozostają mokre przez długi czas (podczas ich zbierania i przenoszenia) i zapobiega wysychaniu zabrudzeń organicznych
- Dzięki zawartości 4 enzymów, produkt skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne na powierzchni narzędzi, takie jak krew, tłuszcz, białko czy skrobia
- Dobrze się spltukuje z uwagi na rozpuszczalność w wodzie
- Nie powoduje korozji materiałów dzięki zawartym w nim inhibitorom korozji
- Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową i nadaje się do stosowania w przypadku wszystkich narzędzi, które można zwilżać
- Może być bezpiecznie stosowany do szkła, gumy, drewna, ceramiki, silikonu, tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej

SKŁAD:

Amylaza, proteaza, lipaza, celulaza, środek powierzchniowo czynny, substancje konserwujące, inhibitory korozji, stabilizatory.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Przed włożeniem narzędzi do wanienki należy pokryć równomierną warstwą pianki jej dno.
- Zanieczyszczone narzędzia umieszczone w wannie dezynfekcyjnej pokryć równomiernie Detro®Enzym Foam.
- Upewnić się, że powierzchnia narzędzi jest całkowicie pokryta pianką.
- Odczekać niezbędny czas kontaktu. Minimum 1 minuta, maksymalnie 72 godz.
- Intensywnie spltukać pod bieżącą wodą.
- Osuszyć i przekazać do dalszej obróbki.
- Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać!

OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.



WYTWÓRCA:

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt,
Istanbul/Turkey
www.detrox.com.tr

POLMIL

IMPORTER:

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl
handlowy@polmil.pl