


# Detro<sup>®</sup> Forte

**Gotowy do użycia preparat na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz pozostałych termolabilnych wyrobów medycznych**

- aktywność sporobójcza – 15 minut
- dezynfekcja – 5 minut
- przebadany wg normy EN 17126
- gotowy do użycia
- szeroka kompatybilność materiałowa
- do użycia manualnego i w myjniach
- kontrola aktywności za pomocą pasków testowych

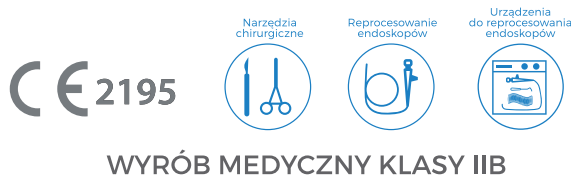

WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIB

GOTOWY DO UŻYCIA

## OPAKOWANIE:

TYP  
OPAKOWANIA



OPAKOWANIE  
ZBIORCZE

4 x KANISTER  
25 x paski testowe

KOD KRESKOWY

8680097100016



**detrox<sup>®</sup>**  
Integrated Disinfection Solutions

**POLMIL**

# Detro® Forte

**Gotowy do użycia preparat na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz pozostałych termolabilnych wyrobów medycznych**

## OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Detro® Forte jest przeznaczony do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego, a także pozostałych narzędzi i wyrobów medycznych, które nie mogą być poddane sterylizacji w wysokiej temperaturze. Preparat wykazuje szeroką kompatybilność materiałową z narzędziami chirurgii małoinwazyjnej, szkłem, tworzywem sztucznym oraz elementami optycznymi. Detro® Forte może być stosowany do dezynfekcji różnych rodzajów endoskopów giętkich oraz ich osprzętu dodatkowego.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia
- Środek do dezynfekcji wysokiego stopnia
- Odpowiedni do dezynfekcji manualnej oraz do stosowania w myjniach-dezynfektorach do endoskopów
- Zapobiega korozji narzędzi dzięki zawartości inhibitorów korozji
- Kompatybilny z endoskopami różnych marek
- Aprobata producenta endoskopów, firmy KARL STORZ

## SKŁAD:

2% aldehyd glutarowy, związki antykorozyjne, substancje pomocnicze.

## SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

DZIAŁANIE	NORMA	CZAS
<b>Bakterie</b>	EN 13727 EN 14561	5 minut
<b>Grzyby</b>	EN 13624 EN 14562	5 minut
<b>Prątki</b>	EN 14348 EN 14563	5 minut
<b>Wirusy (Polio, Adeno, Noro)</b>	EN 14476	5 minut
<b>Spory (B. subtilis)</b>	EN 13704	15 minut
<b>Spory (B. cereus, Cl. difficile)</b>	EN 17126	15 minut

## SPOSÓB UŻYCIA:

- Dodać do kanistra Detro® Forte zawartość opakowania dołączonej substancji buforującej (rys.), zamknąć kanister i wstrząsnąć.
- Pozostawić na 15 minut.
- Wlać do czystego i zamykanego pojemnika
- Przemyte i wypłukane narzędzia zanurzyć całkowicie w roztworze tak, aby nie wystawały żadne elementy.
- Zamknąć pojemnik. Odczekać do upływu czasu kontaktu.
- Wypłukać narzędzia w sterylnej lub destylowanej wodzie.
- Stosować przez okres min. 28 dni. Aktywność należy sprawdzać codziennie przy pomocy pasków testowych.
- Preparat należy wymienić jeśli paski nie zabarwią się na kolory wskazane na tubie.



## OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności preparatu wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.



### WYTWÓRCA:

**Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.**  
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt,  
Istanbul/Turkey  
www.detrox.com.tr

**POLMIL**

### IMPORTER:

**Polmil Sp. z o.o.**  
ul. Przemysłowa 8b  
85-758 Bydgoszcz  
www.polmil.pl  
handlowy@polmil.pl