

Detro[®] San AF

**Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat
do szybkiej dezynfekcji
powierzchni wyrobów medycznych**

- bardzo dobre właściwości myjące
- szybki czas działania - 1 minuta
- skuteczny wobec szczepów MDRO
- przebadany wg normy EN 16615
- szeroka kompatybilność materiałowa
- do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG



CE 2195



WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA

GOTOWY DO UŻYCIA



OPAKOWANIE:

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	KOD KRESKOWY
 750 ml	9 x BUTELKA ze spryskiwaczem	8680097102461
 1L	9 x BUTELKA 5 spryskiwaczy dwufunkcyjnych do butelki 1 l	8680097100757
 5L	4 x KANISTER	8680097101167



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

Detro[®] San AF

Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Detro[®] San AF przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, stetoskopów, kozetek, sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek i innych mebli medycznych. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów. Detro[®] San AF jest kompatybilny ze szkłem, plexą, akrylem, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia
- Bez zawartości aldehydu, fenolu i alkoholu, na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych
- Skuteczność w warunkach brudnych
- Szerokie spektrum skuteczności mikrobiologicznej
- Ekonomiczne zużycie dzięki rozpylaczowi, który może dozować produkt w formie piany
- Skuteczny wobec szczepów MDRO
- Kompatybilny z systemem suchych chust, zapewniającym komfort codziennej pracy i najwyższy standard higieniczny

SKŁAD:

Bis 3-aminopropylododecyloamina, chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy, substancje pomocnicze.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

Bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory do 1 minuty.

DZIAŁANIE	NORMA	CZAS
Bakterie (w tym MDRO: MRSA, VRE, A. baumannii)	EN 13727	1 minuta
Bakterie, grzyby (C. albicans)	EN 16615	1 minuta
Grzyby (C.albicans, A. niger)	EN 13624	1 minuta
Prątki (M. avium, M.terrae)	EN 14348	1 minuta
Wirusy (Polio, Adeno, Noro)	EN 14476	1 minuta
Spory (B. subtilis)	EN 13704	1 minuta

SPOSÓB UŻYCIA:

W celu zdezynfekowania powierzchni należy nanieść preparat Detro[®] San AF na powierzchnię bezpośrednio lub za pomocą czystej ściereczki / ręcznika papierowego. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia efektu bójkowego. Wydajność preparatu 50ml/m². Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.



WYTWÓRCA:

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt,
Istanbul/Turkey
www.detrox.com.tr

POLMIL

IMPORTER:

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl
handlowy@polmil.pl