

Detro[®] San AF WIPES

Gotowe do użycia, bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

- na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych
- pełne spektrum bójcze do 1 minuty
- przebadane wg normy EN 16615
- szeroka kompatybilność materiałowa
- nie pozostawiają smug na powierzchniach
- przyjemny zapach
- wysoka gramatura włókniny / 30g



CE 2195



WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA

GOTOWY DO UŻYCIA



OPAKOWANIE:

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	KOD KRESKOWY
TUBA x 100 SZTUK 18 cm x 18 cm	12 x TUBA	8680097103864
SOFT PACK x 200 SZTUK 22 cm x 23 cm	12 x SOFT PACK	8680097104229



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

Detro[®] San AF WIPES

Gotowe do użycia, bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Gotowe do użycia chusteczki Detro[®] San AF WIPES przeznaczone są do powierzchni wyrobów medycznych nieodpornych na działanie alkoholu. Do stosowania w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, laboratoriach, stomatologii i innych obszarach, gdzie istotne jest zachowanie najwyższego reżimu sanitarnego. Możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów. Chusteczki nie zawierają aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Chusteczki Detro[®] San AF WIPES są kompatybilne ze stałą kwasoodporną, polistyrenem, PVC, policarbonem, ABS, silikonem, HDPE, akrylem, gumą, ceramiką, szkłem.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia
- Możliwość natychmiastowego zastosowania
- Na bazie mieszaniny trzech związków
- Bez aldehydów, fenoli, chloru
- Aprobata producenta głowic USG SonoScape
- Pełne działanie bójcze
- Skuteczna dezynfekcja w warunkach wysokiego reżimu epidemiologicznego
- Mycie i dezynfekcja w jednym kroku

SKŁAD:

Alkil (C12-16) dimetylobenzyloamonu, chlorek didecyldimetyloamonium N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

Bakterie, grzyby, prątki, wirusy do 1 minuty.

DZIAŁANIE	NORMA	CZAS
Bakterie (w tym MDRO: MRSA, VRE, A. baumannii)	EN 13727	1 minuta
Bakterie, grzyby (C. albicans)	EN 16615	1 minuta
Grzyby (C.albicans, A. niger)	EN 13624	1 minuta
Prątki (M. avium, M.terrae)	EN 14348	1 minuta
Wirusy (Polio, Adeno, Noro)	EN 14476	1 minuta

SPOSÓB UŻYCIA:

Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę. Przetrzeć chusteczką całą dezynfekowaną powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia optymalnego efektu bójczego. Nie sputkiwać. Po użyciu pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć. Urządzenia elektryczne przed dezynfekcją odłączyć od źródła zasilania.

OKRES WAŻNOŚCI:

Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Termin ważności produktu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.



WYTWÓRCA:

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt,
Istanbul/Turkey
www.detrox.com.tr

POLMIL

IMPORTER:

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl
handlowy@polmil.pl