

# Detro<sup>®</sup> Sept AF

**Gotowy do użycia, alkoholowy preparat  
do szybkiej dezynfekcji powierzchni  
wyróbów medycznych**

- bardzo dobre właściwości myjące
- szybki czas działania - od 1 minuty
- skuteczny wobec szczepów MDRO
- przebadany wg normy EN 16615
- szeroka kompatybilność materiałowa



CE 2195

WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA

GOTOWY DO UŻYCIA



## OPAKOWANIE:

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	KOD KRESKOWY
	9 x BUTELKA 5 spryskiwaczy dwufunkcyjnych do butelki 1 l	8680097100054
	4 x KANISTER	8680097100061



**detrox<sup>®</sup>**  
Integrated Disinfection Solutions

**POLMIL**

# Detro<sup>®</sup> Sept AF

**Gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych**

## OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Detro<sup>®</sup> Sept AF jest przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, stetoskopów, kozetek, łóżek, sprzętu rehabilitacyjnego. Może być stosowany na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów. Detro<sup>®</sup> Sept AF jest kompatybilny ze szkłem, plexą, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia
- Bez zawartości aldehydu i fenolu
- Szerokie spektrum skuteczności mikrobiologicznej
- Specjalny rozpylacz umożliwia stosowanie w formie piany lub płynu
- Preparat niskoalkoholowy - może być również stosowany do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Kompatybilny z systemem suchych chust, zapewniającym komfort codziennej pracy i najwyższy standard higieniczny

## SKŁAD:

Alkohol etylowy, propan 2-ol, propionian didecylometylopolioksyetyloamoniowy, środki konserwujące, substancja zapachowa, woda dejonizowana.

## SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

Bakterie i grzyby w ciągu 1 minuty, prątki i wirusy w ciągu 5 minut.

DZIAŁANIE	NORMA	CZAS
<b>Bakterie (w tym MDRO: MRSA, VRE, A. baumannii, K. pneumoniae, S. typhimurium, L. pneumophila)</b>	EN 13727 EN 14561	1 minuta
<b>Grzyby (C. albicans)</b>	EN 13624 EN 14562	1 minuta
<b>Bakterie, grzyby (C. albicans)</b>	EN 16615	1 minuta
<b>Prątki (M. avium, M.terrae)</b>	EN 14348	5 minut
<b>Wirusy (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia)</b>	EN 14476	5 minut

## SPOSÓB UŻYCIA:

W celu zdezynfekowania powierzchni należy nanieść preparat Detrosept AF na powierzchnię bezpośrednio lub za pomocą czystej ściereczki / ręcznika papierowego. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia efektu bójczego. Wydajność preparatu 50ml/m<sup>2</sup>. Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

## OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.



### WYTWÓRCA:

**Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.**  
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt,  
Istanbul/Turkey  
[www.detrox.com.tr](http://www.detrox.com.tr)

**POLMIL**

### IMPORTER:

**Polmil Sp. z o.o.**  
ul. Przemysłowa 8b  
85-758 Bydgoszcz  
[www.polmil.pl](http://www.polmil.pl)  
[handlowy@polmil.pl](mailto:handlowy@polmil.pl)