

velo[®] Alcohol Wipes

Velo chusteczki nasączone alkoholem Środek do dezynfekcji wyrobów medycznych na bazie alkoholu

- gotowe do użycia
- na bazie mieszaniny alkoholi
- szybki czas działania: od 30 sekund
- pełne działanie wirusobójcze
- przebadane wg normy EN 16615
- szeroka kompatybilność materiałowa
- nie pozostawiają smug na powierzchniach
- przyjemny zapach
- wysoka gramatura włókniny



WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA

GOTOWY DO UŻYCIA



OPAKOWANIE:

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	KOD KRESKOWY
TUBA 100 SZTUK CHUSTECZEK 18X18CM	12 x TUBA 18X18CM	8680097103949



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

velo[®] Alcohol Wipes

Velo chusteczki nasączone alkoholem
Środek do dezynfekcji wyrobów medycznych na bazie alkoholu

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Chusteczki alkoholowe Velo Alcohol Wipes przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Do stosowania w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, laboratoriach, stomatologii i innych obszarach, gdzie istotne jest zachowanie najwyższego reżimu sanitarnego. Możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów. Kompatybilne ze stałą kwasoodporną, polistyrenem, PVC, policarbonem, ABS, silikonem, HDPE, gumą, ceramiką, szkłem.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użytku
- Możliwość natychmiastowego zastosowania
- Chusteczki nie zawierają aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni, zapewniają bezpieczeństwo stosowania
- Pełne działanie bójcze
- Skuteczna dezynfekcja w warunkach reżimu epidemiologicznego

SKŁAD:

etanol, propan-2-ol, propionian-N-N-didecylo-N-metylopoli(oksyetylo)amonu.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

DZIAŁANIE	CZAS
Bakterie	30 sekund
Grzyby (C.albicans, A. niger)	30 sekund
Prątki (M.terrae)	30 sekund
Wirusy (Polio, Adeno, Noro)	1 minuta

SPOSÓB UŻYCIA:

Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę. Przetrzeć chusteczką całą dezynfekowaną powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia optymalnego efektu bójczego. Nie sputkiwać. Po użyciu pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć. Urządzenia elektryczne przed dezynfekcją odłączyć od źródła zasilania. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności chusteczek wynosi 2 lata od daty produkcji.

Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 12 miesięcy.



WYTWÓRCA:

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt,
Istanbul/Turkey
www.detrox.com.tr

POLMIL

IMPORTER:

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl
handlowy@polmil.pl